

Nocavity set otturazioni dentali provvisorie

TITOLARE:

F.I.M.O. Fabbrica Italiana Materiale Odontotecnico e Odontoiatrico S.r.l.

MARCHIO

Nocavity

CONFEZIONE

set otturazioni dentali provvisorie

PREZZO

11,90 €

INDICAZIONI

A cosa serve **Nocavity set otturazioni dentali provvisorie**

Impasto per otturazioni dentali provvisorie.

Allevia il dolore meccanicamente in caso di perdita di otturazione, piccola carie e denti scheggiati.

MODO D'USO

Come si usa **Nocavity set otturazioni dentali provvisorie**

Dopo aver pulito in profondità la cavità orale, staccare un pezzo di composto dall'apposita barretta.

Modellare il pezzo staccato per 20 secondi e dargli una forma conica.

Inserire il cono all'interno della cavità dentale da isolare.

Il composto indurisce in 20 minuti a contatto con la saliva.

AVVERTENZE

L'utilizzo di Nocavity non rimuove la causa che ha portato al problema, ha il solo scopo di rendere meno problematica l'attesa dell'intervento del dentista.

<https://www.dica33.it/prontuario-farmaci/parafarmaci-nocavity-78285.asp>